

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОДНОРАЗОВОГО ДЕРЖАТЕЛЯ RUSTECH С АВТОМАТИЧЕСКИМ СБРОСОМ ИГЛЫ

Применение

Одноразовые держатели RUSTECH с автоматическим сбросом иглы применяются совместно с двусторонними иглами и вакуумными пробирками RUSTECH при проведении процедуры взятия венозной крови и должны использоваться специально обученным медицинским персоналом в соответствии с данной инструкцией.

Описание

Одноразовые держатели RUSTECH с автоматическим сбросом иглы являются нестерильными и сделаны из пластика. Они совместимы со всеми двусторонними иглами, люэр-адаптерами и иглами-бабочками RUSTECH. Держатели оснащены специальным механизмом, позволяющим при помощи нажатия на кнопку легко сбросить иглу в контейнер для утилизации. Механизм для сбрасывания иглы также изготовлен из пластика, после сброса возвращается в исходное положение.

Меры предосторожности

1. Проверьте держатель RUSTECH с автоматическим сбросом иглы перед использованием.
2. Не используйте поврежденный держатель RUSTECH с автоматическим сбросом иглы.
3. Загрязненный кровью держатель RUSTECH с автоматическим сбросом иглы считается опасным и подлежит немедленной обработке/утилизации в соответствии с правилами медицинского учреждения.
4. Запрещается повторное надевание на иглы RUSTECH снятого защитного футляра
5. После окончания процедуры взятия крови или при повреждении/закупорке иглы сбросьте ее с держателя RUSTECH с автоматическим сбросом иглы в контейнер для утилизации игл или его аналог.
6. Использованные держатели RUSTECH с автоматическим сбросом иглы складывайте в контейнер для утилизации или его аналог.
7. Держите руки позади иглы в течение всего времени использования и утилизации.
8. Обращайтесь со всеми биологическими образцами и острыми предметами (двусторонними иглами, люэр-адаптерами и иглами-бабочками) в соответствии с правилами, принятыми в вашем медицинском учреждении.
9. Не оставляйте без внимания случаи контакта с биологическими образцами (например, при случайном уколе иглой во время венопункции), так как при этом возможна передача возбудителей опасных инфекций (ВИЧ, гепатиты и др.).

Процедура взятия венозной крови

Перед процедурой венопункции убедитесь, что в непосредственном доступе находятся следующие предметы:

1. Все вакуумные пробирки RUSTECH для взятия венозной крови нужных объемов и с нужными наполнителями.
2. Двусторонние иглы нужного диаметра и держатели RUSTECH с автоматическим сбросом иглы.
3. Средства индивидуальной защиты от контакта с кровью (одноразовые перчатки, спецодежда, маска).
4. Пропитанные спиртом ватные тампоны или спиртовые салфетки для очистки места венопункции.
5. Жгут.
6. Сухая стерильная марля, а также бактерицидный пластырь или бинт.
7. Контейнер для утилизации или его аналог.

Техника венопункции и взятия крови:

1. Прозеинфицируйте руки и наденьте одноразовые перчатки.
2. Выберите подходящую пробирку/пробирки.
3. Снимите защитный колпачок с клапанной части двусторонней иглы RUSTECH.

4. Вкрутите двустороннюю иглу RUSTECH перпендикулярно в держатель RUSTECH с автоматическим сбросом иглы. Проверьте, плотно ли игла сидит в держателе, чтобы избежать ее соскальзывания во время процедуры.
Внимание! Неправильное вкручивание двусторонней иглы в держатель может привести к повреждению держателя и иглы и последующему выпадению иглы из держателя во время венопункции.
5. Расположите руку пациента на инъекционном столе.
6. Наложите жгут на несколько сантиметров выше места венопункции, чтобы вызвать временный гемостаз. Максимальное время наложения жгута — 1 минута. Продезинфицируйте место венопункции.
7. Снимите с двусторонней иглы цветной защитный колпачок и введите иглу в вену под углом 15° движением снизу вверх. Рука пациента должна быть немного опущена.
8. Вставьте пробирку в держатель RUSTECH с автоматическим сбросом иглы и надавите, чтобы внутренняя игла проколола резиновую часть ее крышки (при этом необходимо указательным и средним пальцем придерживать выступы держателя, а большим пальцем проталкивать пробирку к игле). Следите за положением пробирки по центру держателя, чтобы предотвратить прокол боковой стенки крышки и преждевременную потерю вакуума.
9. Сразу после начала поступления крови в пробирку ослабьте жгут. Кровь будет поступать в пробирку, пока не компенсирует имеющийся в пробирке вакуум. Для визуального контроля уровня заполнения на этикетке пробирки имеется риска. Во время процедуры не допускайте контакта содержимого пробирки с крышкой или внутренней иглой. Всегда при помощи большого пальца удерживайте пробирку в держателе для обеспечения корректного наполнения пробирки.
Внимание! Кровь может изредка протекать из муфты иглы. Примите обычные меры предосторожности для снижения риска заражения.
10. После прекращения тока крови и полного наполнения пробирки осторожно извлеките ее из держателя и поместите в него следующую пробирку.
11. Как только кровь будет собрана в последнюю пробирку, осторожно извлеките двустороннюю иглу из вены, одновременно прижимая к месту венопункции сухой стерильный ватный тампон до прекращения кровотечения. После образования ступки наложите на место венопункции повязку либо бактерицидный пластырь.
Внимание! После венопункции верхняя часть крышки может быть испачкана остатками крови. Примите защитные меры для предотвращения контакта с этой кровью во время работы с пробирками.
12. После окончания процедуры взятия крови или при повреждении/закупорке иглы нажмите на голубую боковую кнопку держателя RUSTECH с автоматическим сбросом иглы и сбросьте иглу в контейнер для утилизации игл или его аналог. Когда вы отпустите кнопку, механизм придет в исходное состояние. Поместите использованный держатель RUSTECH с автоматическим сбросом иглы в контейнер для утилизации или его аналог.

Условия хранения

Храните одноразовые держатели RUSTECH с автоматическим сбросом иглы при температуре 5-40°C.

Внимание! Избегайте воздействия прямых солнечных лучей. Превышение рекомендованной температуры хранения может привести к потере качества держателей RUSTECH с автоматическим сбросом иглы.

Срок годности

Срок годности одноразовых держателей RUSTECH с автоматическим сбросом иглы 60 месяцев с даты производства.



ООО «МК РУСТЕК»

109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 28А

Тел: +7 (495) 984 7392, +7 (495) 506 6785

Факс: +7 (495) 984 7392

Email: info@rustech.ru

www.rustech.ru